



Gebruiksaanwijzing & onderhoudsinstructies

Lees deze aandachtig door voor in gebruik name van de *LilyPadz*

Hartelijk gefeliciteerd! Met LilyPadz heeft u de nieuwste generatie zoogcompressen in handen. We wensen u en uw baby een fijne borstvoedingsperiode!

Verpakkingsinhoud:


- 1) 1 bewaardoosje
- 2) 2 bewaarschildjes
- 3) 2 zoogcompressen
- 4) 1 gebruiksaanwijzing

Hoe werken LilyPadz?

LilyPadz werken volgens het eeuwenoude principe dat druk op de tepel (zoals van een vinger) tijdelijk het lekken van melk tegengaat. Doordat de druk van buitenaf groter is dan de druk vanuit de borst, zal er geen moedermelk gelekt worden. LilyPadz handhaven de druk die uitgeoefend wordt op het moment van aanbrenge. Deze druk bepaalt uiteindelijk het succes.

Wanneer de melkproductie nog niet in balans is met de drinkbehoefte van uw baby kan het voorkomen dat de druk van binnenuit groter wordt dan buitenaf. Er bestaat dan een kans op doorlekken. Het is daarom aan te raden in deze periode, tussen de voedingen door, de LilyPadz even opnieuw aan te brengen. LilyPadz kunnen niet gebruikt worden om voedingen over te slaan.

Hoe breng ik LilyPadz aan?

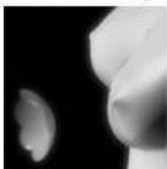

Heel gemakkelijk!
Keer de *LilyPadz* binnenste buiten met de plakkerige kant naar uw huid. Wees er zeker van dat uw borst en de *LilyPadz* droog en schoon zijn.

Plaats de *LilyPadz* op de melkuitgangen van de tepel. Druk de *LilyPadz* vervolgens stevig op de tepel*)

Met de tepel ingedrukt, strijkt u de *LilyPadz* glad over de borst en verwijder luchtbelletjes.

Verwijder eenvoudig als u gaat voeden en breng, na reiniging, droog weer aan.

*) *LilyPadz* houdt de druk die wordt gebruikt tijdens het opbrengen vast. De mate van druk die u gebruikt is bepalend voor het succes. Geef stevige druk en vermijdt luchtbelletjes.

Hoe reinig ik de LilyPadz?

Verwijder voor het gebruik en het schoonmaken de *LilyPadz* van de transparante bewaarschildjes. Door het gebruik van *LilyPadz* zullen huidschilfers, huidvet en dergelijke op de *LilyPadz* achterblijven. Deze kunnen de plakkracht nadelig beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de *LilyPadz* goed schoon, vet- en stofvrij te houden. Reinigen gaat het beste met een olievrrije, crèmevrrije en lotionvrrije zeep. Ontvettende zeep (bijvoorbeeld afwasmiddel) geven het beste resultaat.

Was de *LilyPadz* minimaal 1x per dag met zeep (zie boven) en warm water. Wrijf tijdens het wassen de plakkende zijde van de *LilyPadz* tegen elkaar of ga er met uw vingers overheen om huidschilfers, huidvet en dergelijke te verwijderen.

Goed afspoelen met warm water. Schud het water van de *LilyPadz* en laat ze aan de lucht drogen in een stofvrrije omgeving. (Gebruik eventueel een föhn.)

Droog de *LilyPadz* niet af met een handdoek, keukenrol of iets dergelijks. Hierdoor kunnen er weer stofjes en pluusjes op de *LilyPadz* achterblijven die de plakkracht nadelig beïnvloeden.

Indien uw kraanwater veel mineralen of ijzer bevat, raden wij u aan *LilyPadz* te wassen met gedestilleerd of zacht water.

Hoe bewaar ik mijn LilyPadz?

Als u de *LilyPadz* niet gebruikt, bewaar ze dan, na schoonmaken op de bewaarschildjes geplakt in het doosje.

Kan ik LilyPadz desinfecteren?

Indien nodig kunt u de *LilyPadz* desinfecteren door ze 1 uur te weken in een bakje met 50% water en 50% azijn. Was ze hierna goed met zeep en spoel goed na met warm water. Door uitkoken of het gebruik van de magnetronsterilisator zal de levensduur van *LilyPadz* verkort worden. Slijtage hierdoor veroorzaakt valt niet onder de productgarantie.

Kan ik tepelzalf gebruiken?

Het gebruik van tepelzalf kan de plakkracht nadelig beïnvloeden. Gebruik zalf spaarzaam en alleen op de tepel en areola.

Kan ik LilyPadz gebruiken tijdens het voeden op de andere borst?

Ja, dat kan. Echter het kan voorkomen dat de door de toeschietreflex de melkdruk zo groot wordt, dat de *LilyPadz* losraakt en als gevolg daarvan doorlekt. Veelal kan dit voorkomen worden door vóór het voeden de *LilyPadz* opnieuw aan te brengen en eventueel met de pols wat extra druk te geven.

Productgarantie

Indien u de bovenstaande instructies opvolgt, zult u lang plezier hebben van uw aankoop. Productgarantie tot twee maanden na aankoop en op vertoon van aankoopbewijs.

Voor meer informatie kijk op www.lilypadz.com / www.prettypumtrading.nl

Sommige vrouwen kunnen een lichte irritatie ervaren bij de eerste keren gebruik van *LilyPadz*. Dit verdwijnt naar enkele keren gebruik. Waarschuw anders de huisarts. Product en verpakking buiten bereik van kinderen bewaren.

Made of 100% Silicone
Made in the USA

Geïmporteerd door:
PrettyMum BV
Postbus 36166
1020 MD Amsterdam
Nederland www.prettypumtrading.nl